




STERINORM® Couverture de l'arceau pour Cios Spin

STERILE R


Utilisation conforme : Revêtement d'arc en C conçu pour la durée d'une utilisation

1

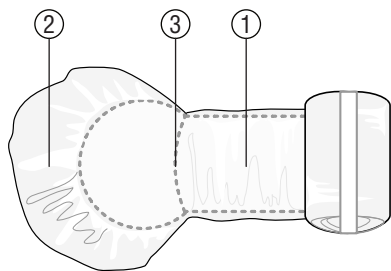


Déplier la gaine (1) autant que possible.
Rabattre la housse de l'émetteur de rayon X (2)
le long de la jointure de liaison (3), vers le bas.

2

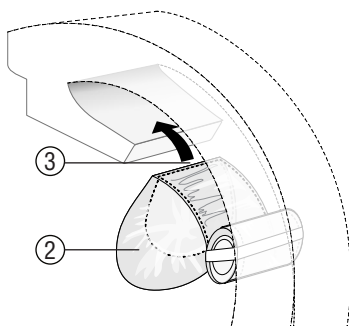


La jointure de liaison (3) étant vers
l'avant, tirer la housse (2)...

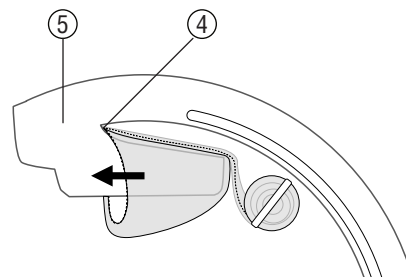


...jusqu'au bord (4) de l'émetteur
de rayon X (5).

3

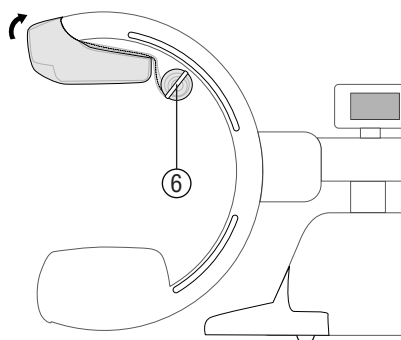


La housse doit recouvrir l'intégralité de
l'émetteur de rayon X. La bande (6) doit
ensuite être détachée.

4

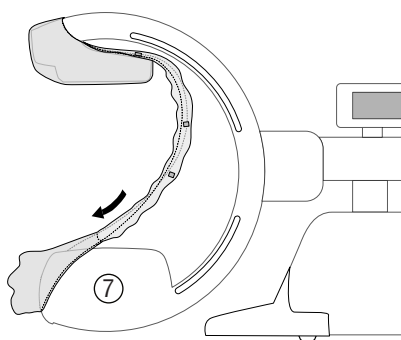


La housse peut à présent être complètement
dépliée et tirée jusqu'à l'amplificateur
d'image (7).

5

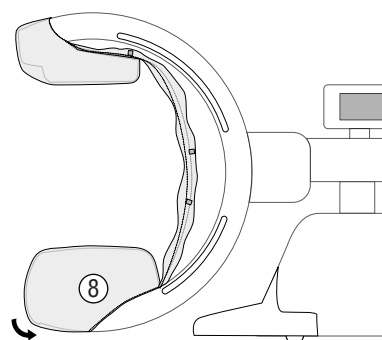


Tirer entièrement la housse (8)
sur l'amplificateur d'image.

6

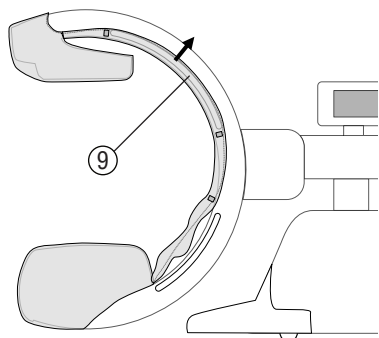


Puis, tendre le caoutchouc de
maintien sur la rampe 1 (9).

7

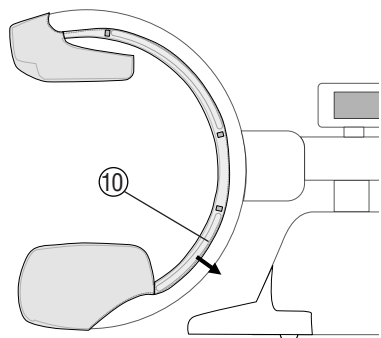

Appliquer le même procédé
pour la rampe 2 (10).

8

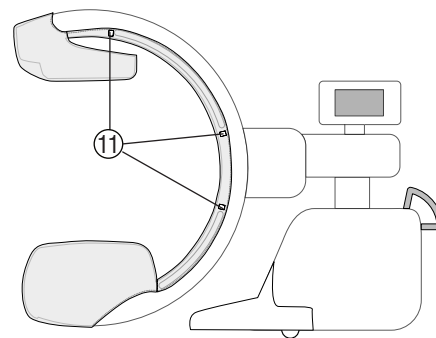

À présent, après avoir retiré le papier protecteur,
le film peut être fixé à l'aide des surfaces
adhésives (11) sur les deux côtés de l'arceau.

















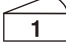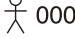


CONTENU DE L'EMBALLAGE		DÉTAILS
REF 32800	STERINORM® Couverture de l'arceau pour Cios Spin	Convient pour : Siemens Cios Spin®
Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande.		

MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES

-  Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé
-  **ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !**
-  Non réutilisable
-  Ne pas restériliser
-  **ATTENTION : ne doit pas être réutilisé** en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .
-  **ATTENTION : le mode d'emploi n'est valable que pour les produits ci-joints .**
-  **ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau de la couture supérieure !**
-  Conserver au sec
-  Conserver à l'abri de la lumière solaire
-  **ATTENTION : l'utilisation d'un couvercle d'appareil peut nuire à la qualité de l'image !**
-  **ATTENTION : Ne s'appliquer que par un professionnel de santé !**
-  **ATTENTION : Tout incident grave** lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

-  Stérilisé par irradiation
-  Date limite d'utilisation
-  Sans latex
-  Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur www.heisig.de
-  Nombre d'unités de consommation par sachet pelable
-  Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication
-  Numéro de lot
AAMM0123
-  Fabricant
-  Nombre de sachets pelables par carton
-  Date de fabrication
-  Référence de la pièce
REF 00000
-  Numéro central pharmaceutique
-  Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.
-  Dispositif médical
-  Système barrière *stérile* simple
-  Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur
-  Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.