




UNILINE® Recouvrement d'écran

STERILE R


Utilisation conforme : Film hautement transparent stérile pour le revêtement de moniteurs conçu pour la durée d'une utilisation

1

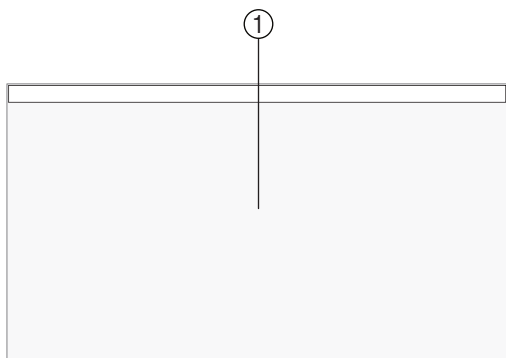


Déplier le recouvrement d'écran (1)

2

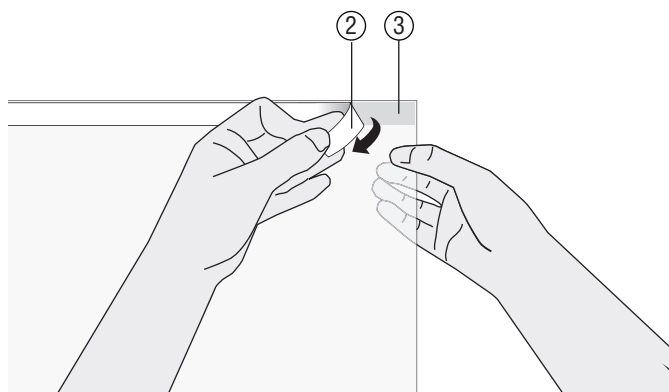

Ensuite, retirer le papier protecteur (2) de la bande adhésive (3).

3

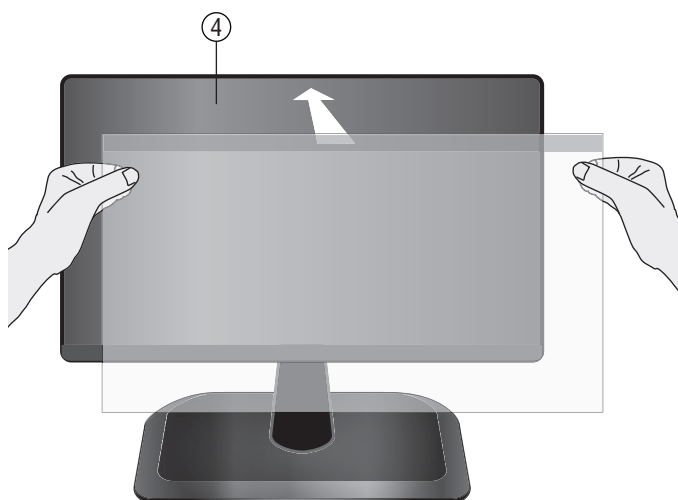

Positionner le revêtement – dans le sens de collage – au bord supérieur du moniteur (4)

4



En lissant le film dans la zone de la bande adhésive, mieux fixer le revêtement sur le moniteur.



VARIANTES

UNILINE® Recouvrement d'écran	REF 37054	REF 37057	REF 37059
Dimension	340 x 360 mm	650 x 360 mm	780 x 360 mm
Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande.			

MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES



Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé



ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !



Non réutilisable



Ne pas restériliser



ATTENTION : ne doit pas être réutilisé en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .



ATTENTION : le mode d'emploi n'est valable que pour les produits ci-joints .



ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau de la couture supérieure !



Conserver au sec



Conserver à l'abri de la lumière solaire



ATTENTION : l'utilisation d'un couvercle d'appareil peut nuire à la qualité de l'image !



ATTENTION : Ne s'appliquer que par un professionnel de santé !



ATTENTION : Tout incident grave lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS



Stérilisé par irradiation



Date limite d'utilisation



Sans latex



Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur www.heisig.de



Nombre d'unités de consommation par sachet pelable



Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication



Numéro de lot
AAMM0123



Fabricant



Nombre de sachets pelables par carton



Date de fabrication



Référence de la pièce

PZN: 0000000

Numéro central pharmaceutique



Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.



Dispositif médical



Système barrière *stérile* simple



Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur



Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

