



**UNILINE® Copertura dello schermo****STERILE R****Destinazione d'uso:** Pellicola sterile, altamente trasparente per la copertura di monitor per la durata di un impiego

1

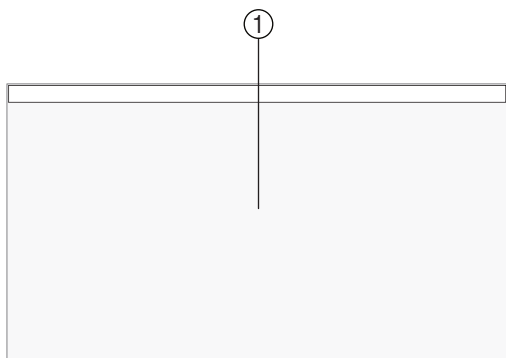


Stendere la copertura dello schermo (1)

2

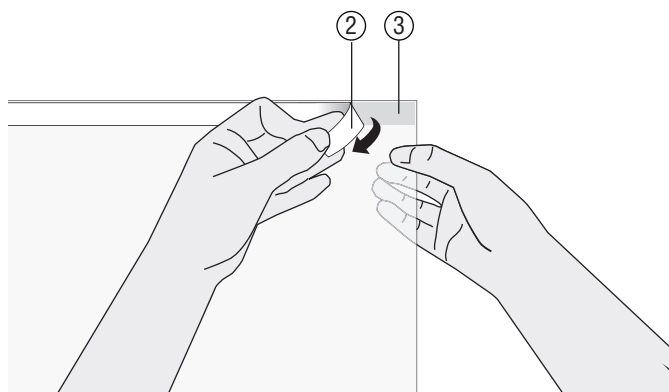

Staccare quindi la carta protettiva (2) della striscia adesiva (3)

3

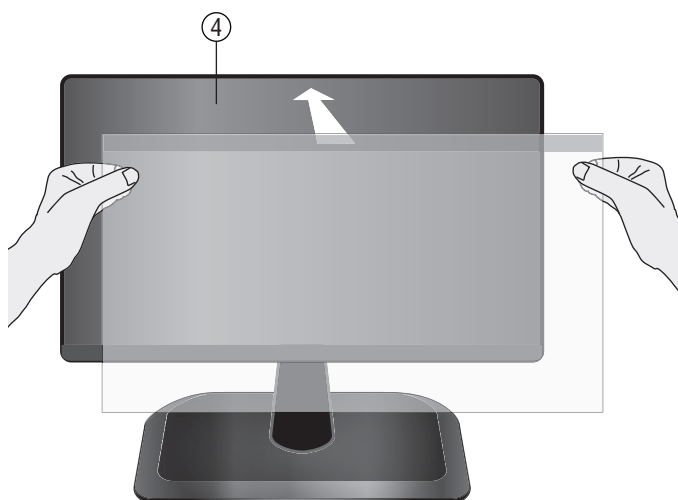

Posizionare ora la copertura sul bordo superiore del monitor (4), in direzione dell'adesivo.

4



Fissare bene la copertura sul monitor lisciando la zona della striscia adesiva.



VARIANTI

UNILINE® Copertura dello schermo	REF 37054	REF 37057	REF 37059
Dimensione	340 x 360 mm	650 x 360 mm	780 x 360 mm
A richiesta, sono disponibili le specifiche dettagliate dei prodotti			

AVVERTENZE e INFORMAZIONI IMPORTANTI



Non utilizzare in caso di perdita della sterilità o di confezione danneggiata



ATTENZIONE: Non utilizzare i prodotti danneggiati



Non riutilizzare



Non risterilizzare



ATTENZIONE: Non adatto al riutilizzo, perché le prestazioni necessarie potrebbero essere compromesse e potrebbe comparire un'infezione del paziente.



ATTENZIONE: Le istruzioni per l'uso valgono solo per i prodotti in dotazione.



ATTENZIONE: Aprire il sacchetto pelabile dalla cucitura sul lato superiore!



Conservare secco



Conservare al riparo dalla luce solare



ATTENZIONE: L'uso di una copertura per apparecchiature può compromettere la qualità delle immagini



ATTENZIONE: Da utilizzare solo da personale medico!



ATTENZIONE: Tutti gli incidenti gravi relativi al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI



Sterilizzato con radiazioni ionizzanti



Data di scadenza



Senza lattice



www.heisig.de

Consultare le istruzioni per l'uso. È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal sito www.heisig.de **www.heisig.de**



Numero delle unità di consumo per sacchetto pelabile



Numero personale del collaboratore addetto



Numero di lotto:
AAMM0123



Produttore



Numero dei sacchetti pelabili per scatola



Data di fabbricazione



Codice articolo



Codice centrale farmaceutico



Il prodotto è conforme ai requisiti legali validi per i dispositivi medici. Il produttore viene monitorato con il numero 0197 dall'organismo notificato.



Dispositivo medico



Sistema a singola barriera sterile



Sistema a singola barriera sterile con imballaggio protettivo esterno



Ecologico se lo smaltimento è adeguato. La combustione non dà origine a gas tossici. Deposito in discarica senza compromissione delle acque sotterranee.

